

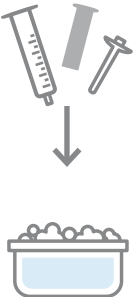

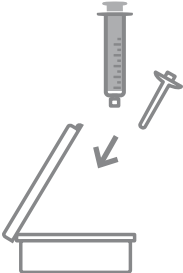



Οδηγίες καθαρισμού: σύριγγα και ακροφύσιο

Ο κατάλληλος καθαρισμός της σύριγγας καθώς και του ακροφυσίου μετά από κάθε χρήση είναι σημαντικός προκειμένου να αποφευχθεί η επιμόλυνση του φαρμάκου. Οι ακόλουθες πληροφορίες παρατίθενται αποκλειστικά για συμβουλευτικούς σκοπούς. Είναι απαραίτητη η ακολουθία των οδηγιών του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας κατά τη χρήση του προϊόντος. Η διαδικασία καθαρισμού της σύριγγας και του ακροφυσίου απεικονίζεται παρακάτω. Δεν είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του ακροφυσίου όταν δεν χρησιμοποιείται κατά τη χορήγηση.

<p>1.</p>  <p>Γεμίστε τη σύριγγα (χρησιμοποιώντας το ακροφύσιο) με νερό βρύσης ή με νερό το οποίο έχει υποστεί την διαδικασία του βρασμού και έχει επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου.</p>	<p>2.</p>  <p>Ξεπλύνετε τη σύριγγα (χρησιμοποιώντας το ακροφύσιο). Επαναλάβετε 1-3 φορές έως την πλήρη απομάκρυνση του αρχικού περιεχομένου.</p>	<p>3.</p>  <p>Διαχωρίστε τον κύλινδρο της σύριγγας, το έμβολο (και το ακροφύσιο). Καθαρίστε τη σύριγγα, το έμβολο (και το ακροφύσιο) με ζεστό νερό και κατάλληλο καθαριστικό (σαπούνι).</p>	<p>4.</p>  <p>Ξεπλύνετε τον κύλινδρο της σύριγγας, το έμβολο (και το ακροφύσιο) με κρύο νερό βρύσης και στεγνώστε τα με απορροφητικό χαρτί.</p>	<p>5.</p>  <p>Συναρμολογήστε ξανά τον κύλινδρο της σύριγγας και το έμβολο. Αποθηκεύστε τη σύριγγα (και το ακροφύσιο) σε ένα καθαρό και ξηρό μέρος.</p>	<p>6.</p>  <p>ΜΕΓ. 7 ΗΜΕΡΕΣ</p> <p>Συνιστάται η αντικατάσταση της σύριγγας (και του ακροφυσίου), μετά το πέρας 7 ημερών από την πρώτη χρήση.</p> <p>Η σύριγγα θα πρέπει επίσης να αντικατασταθεί εάν το έμβολο γίνει πολύ σκληρό κατά τη μετακίνηση στον κύλινδρο της σύριγγας ή εάν οι διαβαθμίσεις της είναι δυσδιάκριτες.</p>
--	---	--	---	---	--